



Bijsluiter Ear Band-It

1. Voorbereiding van de oren

Indien je Putty Buddies zwemoordoppen gebruikt, maak deze dan plat en plaats ze voorzichtig over je gehoorgang voordat je de Ear Band-It aanbrengt.

2. Ear Band-It plaatsen

Wikkel de Ear Band-It rondom het hoofd, zorg ervoor dat beide oren volledig bedekt zijn. De Ear Band-It kruist comfortabel op of net onder de haarlijn.

3. Pasvorm afstellen

Bevestig de Ear Band-It aan de achterkant van je nek voor een optimale en comfortabele pasvorm. Gebruik het klittenband om de band stevig op zijn plaats te houden.

4. Comfort controleren

Controleer of de Ear Band-It niet te strak zit, maar ook niet los genoeg om te verschuiven. Voor het beste resultaat draag je de Ear Band-It onder je haar. Zo blijft de Ear Band-It tijdens het zwemmen perfect zitten.

5. Verwijderen en opbergen

Verwijder de Ear Band-It voorzichtig na gebruik. Bewaar de Ear Band-It op een droge en schone plek om de levensduur te verlengen.



Bijsluiter Ear Band-It ULTRA

1. Voorbereiding van de oren

Indien je Putty Buddies oordoppen gebruikt, maak deze dan plat en plaats ze voorzichtig over je gehoorgang voordat je de Ear Band-It aanbrengt.

2. Ear Band-It plaatsen

Wikkel de Ear Band-It rondom het hoofd, zorg ervoor dat beide oren volledig bedekt zijn. De Ear Band-It kruist comfortabel op of net onder de haarlijn.

3. Pasvorm afstellen

Bevestig de Ear Band-It aan de achterkant van je nek voor een optimale en comfortabele pasvorm. Gebruik het klittenband om de band stevig op zijn plaats te houden.

4. Comfort controleren

Controleer of de Ear Band-It niet te strak zit, maar ook niet los genoeg om te verschuiven. Voor het beste resultaat draag je de Ear Band-It onder je haar. Zo blijft de Ear Band-It tijdens het zwemmen perfect zitten.


5. Verwijderen en opbergen

Verwijder de Ear Band-It voorzichtig na gebruik. Bewaar de Ear Band-It op een droge en schone plek om de levensduur te verlengen.



Meet het hoofdomtrek voordat u bestelt!

Problemen met de maat en het gedoe van het retourneren van artikelen kunnen eenvoudig worden voorkomen door de hoofdomtrek te gebruiken, zoals aangegeven in de maattabel. Het gebruik van een zacht meetlint is het beste, maar een touwtje en een standaard meetlint werken ook.

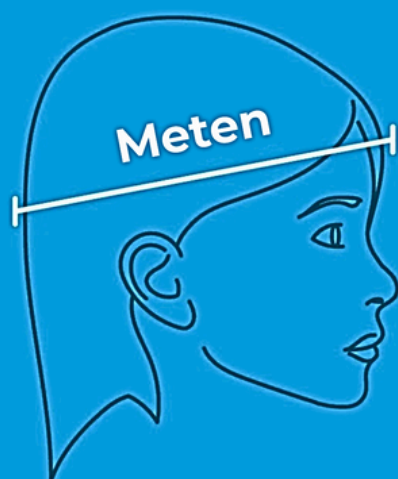

	Past op hoofdmaten van	Aanbevolen leeftijd*
<i>Small</i>	16.5 in – 18.5 in 42 cm – 47 cm	Tot 18 maanden
<i>Medium</i>	18.5 in – 20.5 in 47 cm – 52 cm	2 - 7 jaar
<i>Large</i>	20.5 in – 24 in 52 cm – 61 cm	8 jaar en volwassen

~~~~~ Houd er rekening mee dat de aanbevolen leeftijdscategorieën zijn gebaseerd op gemiddeld grote hoofden. ~~~~~

\*We zien vaak dat kinderen met een groter dan gemiddeld hoofd één maat groter nodig hebben als we alleen kijken naar de leeftijdsaanbevelingen. **NOGMAALS, HET IS ALTIJD HET BESTE OM DE MAAT TE METEN EN DE MAATTABEL TE CONTROLEREN.**







# **Bijsluiter Putty Buddies**

## **1. Voorbereiding van de handen**

Pak de Putty Buddies alleen vast met schone, droge handen. Raak de Putty Buddies niet aan met vette/vuile handen of breng ze niet in contact met lotions, oliën, haar en andere op olie gebaseerde stoffen.

## **2. Voorbereiding van de oren**

Zorg ervoor dat het oor van de gebruiker schoon, droog en vrij van oorsmeer/oliën is voordat je de Putty Buddies over de gehoorgang plaatst.

## **3. Controleren**

Zorg ervoor dat de Putty Buddies geen scheuren of vouwen heeft voordat je deze over de gehoorgang plaatst. Als dit het geval is, gooi deze dan weg en gebruik een nieuw paar.

## **4. Plaatsen**

Druk de Putty Buddies plat tot een schijf, plaats deze over de gehoorgang en druk voorzichtig op de oordop in een richting naar buiten vanaf de gehoorgang om de Putty Buddies in het buitenste kraakbeen van het oor te "vergrendelen".

## **5. Verwijderen**

Om de Putty Buddies te verwijderen, pak je de oorlel vast met je duim aan de achterkant van de oorlel en je vingers aan de voorkant van de oorlel. Duw/trek meerdere keren omhoog en omlaag.

Dit zou ervoor moeten zorgen dat de Putty Buddies gemakkelijk in één uniform stuk uit het oor loskomen zonder resten achter te laten.

*Ouders moeten het oor van hun kind na elk gebruik controleren om er zeker van te zijn dat er geen siliconenmateriaal rond de gehoorgang achterblijft.*

## **6. Bewaren en opbergen**

Bewaar de oordopjes na het verwijderen in de plastic container (afgedekt) tot verder gebruik.



# **Bijsluiter Putty Buddies**

## **LET OP:**

### **1. Aanbrengen**

Bedek alleen de opening van het oor. NIET IN HET GEHOORGANG.

### **2. Gebruik**

Putty Buddies zijn veilig wanneer ze worden gebruikt zoals voorgeschreven.

### **3. Let op baby's**

Buiten bereik van baby's houden.

### **4. Niet inslikken**

Als ze worden ingeslikt, zijn de Putty Buddies niet giftig, maar ze kunnen de ademhaling belemmeren als ze in de luchtpijp terechtkomen.

### **5. Smeren**

Smeer de Putty Buddies niet te dun uit.

### **6. Vermijden**

Vermijd contact met haar en lotions op oliebasis.



# **Bijsluiter Putty Buddies**

## **TIPS**

1. Plaats de Putty Buddies nooit met kracht in je gehoorgang.
2. Gebruik altijd schone en droge handen om ze vast te houden, zo voorkom je vuil en irritatie.
3. Zorg dat zonnebrandcrème, bruiningsoliën en huidbevochtigers helemaal van je handen zijn verwijderd voordat je de Putty Buddies aanraakt.
4. Putty Buddies mogen alleen door een volwassene in een schone en droge gehoorgang worden geplaatst. Niet door kinderen.
5. Druk de Putty Buddies met je vingers plat en vorm ze zo dat ze de buitenkant van je oor bedekken en comfortabel zitten.
6. Scheur de Putty Buddies nooit, want dan werken ze niet meer goed.
7. Gebruik voor elk oor een hele, onbeschadigde Putty Buddies.
8. Als de Putty Buddies loskomen, barst of beschadigd is, gebruik ze dan niet meer. Gooi ze weg en pak een nieuw paar.
9. Verwijder de Putty Buddies voorzichtig door onder de achterkant van je oor omhoog te drukken en tegelijk je oorlel naar beneden te trekken. Wissel deze beweging een paar keer af, zo komen ze makkelijk los.
10. Vervang Putty Buddies na maximaal twee weken gebruik, of eerder als ze vies zijn, barsten, verkruimelen of hun kleefkracht verliezen.





## **Bijsluiter Putty Buddies**

11. Als er na het verwijderen materiaal in je gehoorgang achterblijft, probeer het dan niet zelf weg te halen.

Dit kan irritatie of schade veroorzaken. Ga zo snel mogelijk naar een KNO-arts (geen huisarts) die het veilig voor je kan verwijderen.

12. Siliconen stoten water af en zijn lastig met water van huid of haar te verwijderen. Gebruik minerale olie of een olieproduct op natuurlijke basis om eventueel siliconenmateriaal voorzichtig weg te halen.

13. Putty Buddies zijn alleen bedoeld voor gebruik in water. Zit je langer dan vijf minuten uit het water, haal ze dan uit je oren, bewaar ze droog en doe ze pas weer in of gebruik een nieuw paar als je terug het water in gaat.

14. Lukt het per ongeluk dat Putty Buddies dieper je gehoorgang in schuift, probeer hem dan niet zelf te verwijderen met pincet, wattenstaafje of andere hulpmiddelen.

Dit maakt het vaak erger. Ga direct naar een KNO-arts, die het veilig en met de juiste middelen kan verwijderen.

Zolang je dit niet zelf probeert, is een kortstondige aanwezigheid van Putty Buddies in de gehoorgang meestal niet schadelijk.