

Putty Buddies

Gebruiksaanwijzing:

1. Pak de siliconen alleen vast met schone, droge handen. Raak de siliconen niet aan met vette/vuile handen of breng ze niet in contact met lotions, oliën, haar en andere op olie gebaseerde stoffen.
2. Zorg ervoor dat het oor van de gebruiker schoon, droog en vrij van oorsmeer/oliën is voordat u de oordopjes over de gehoorgang plaatst.
3. Zorg ervoor dat de oordop geen scheuren of vouwen heeft voordat u deze over de gehoorgang plaatst. Als dit het geval is, gooi deze dan weg en gebruik een nieuw paar.
4. Druk de oordop plat tot een schijf, plaats deze over de gehoorgang en druk voorzichtig op de oordop in een richting naar buiten vanaf de gehoorgang om de siliconen in het buitenste kraakbeen van het oor te "vergrendelen".
5. Om de oordop te verwijderen, pakt u de oorlel vast met uw duim aan de achterkant van de oorlel en uw vingers aan de voorkant van de oorlel. Duw/trek meerdere keren omhoog en omlaag. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de siliconen gemakkelijk in één uniform stuk uit het oor loskomen zonder resten achter te laten. Ouders moeten het oor van hun kind na elk gebruik controleren om er zeker van te zijn dat er geen siliconenmateriaal rond de gehoorgang achterblijft.
6. Bewaar de oordopjes na het verwijderen in de plastic container (afgedekt) tot verder gebruik.

LET OP:

1. Bedek alleen de opening van het oor. NIET IN HET GEHOORGANG.
2. Siliconen oordopjes zijn veilig wanneer ze worden gebruikt zoals voorgeschreven.
3. Buiten bereik van baby's houden.
4. Als ze worden ingeslikt, zijn de dopjes niet giftig, maar ze kunnen de ademhaling belemmeren als ze in de luchtpijp terechtkomen.
5. Smeer siliconen dopjes niet te dun uit.
6. Vermijd contact met haar en lotions op oliebasis.

Tips:

1. **NIET** met kracht in de gehoorgang plaatsen.
2. Met schone, droge handen hanteren.
3. Zorg ervoor dat zonnebrandcrème, bruiningsoliën of huidbevochtigers van de handen zijn verwijderd voordat u ze aanraakt.
4. Oordopjes moeten door een volwassene in een schone en droge gehoorgang worden geplaatst, nooit door een kind.
5. Druk de oordop plat met uw vingers en vorm hem zo dat hij de buitenkant van het oor bedekt totdat hij goed past.
6. Scheur de oordoppen NOOIT.
7. Gebruik de hele oordop voor elk oor.

8. Als de oordop los lijkt te raken of barst, gebruik hem dan niet en probeer hem niet opnieuw te vormen. Gooi hem weg en gebruik een nieuw paar.
9. Verwijder de oordoppen door omhoog te drukken, onder de achterkant van het oor. Trek vervolgens de oorlel naar beneden. Door deze technieken meerdere keren af te wisselen, komt de oordop los van de gehoorgang, zodat u hem gemakkelijk kunt verwijderen en opbergen.
10. Gooi hem weg na 2 weken gebruik of wanneer de oordoppen vuil worden, beginnen te barsten/verkrummen of hun plakkerigheid verliezen.
11. Als er na het verwijderen van de oordop nog materiaal in de gehoorgang achterblijft, probeer dit materiaal dan niet zelf te verwijderen, omdat u het dan dieper naar binnen kunt duwen. Raadpleeg zo snel mogelijk een KNO-arts (geen generalist) die het materiaal gemakkelijk kan verwijderen.
12. Let op: siliconen zijn waterafstotend en kunnen waarschijnlijk niet van de huid of het haar worden verwijderd met water. Als er siliconenmateriaal aan de huid of het haar blijft plakken, gebruik dan minerale olie of een product op basis van natuurlijke olie om het materiaal te verwijderen.
13. Oordopjes zijn ALLEEN bedoeld voor gebruik in water. Als de gebruiker langer dan 5 minuten uit het water is, verwijder dan de oordopjes, bewaar ze en breng ze opnieuw aan (of gebruik een nieuw paar) wanneer u weer het water in gaat.
14. Als u een siliconen oordopje in uw gehoorgang duwt, probeer het dan niet zelf te verwijderen. Gebruik geen pincet, wattenstaafjes of andere hulpmiddelen, omdat deze de dopjes verder in de gehoorgang kunnen duwen. Raadpleeg een KNO-arts, aangezien zij de juiste instrumenten en vaardigheden hebben om de dopjes veilig te verwijderen. Een siliconen oordopje dat kortstondig in de gehoorgang zit, kan geen kwaad. Dit geldt zolang u niet zelf probeert het oordopje te verwijderen en het daardoor per ongeluk nog dieper in de gehoorgang duwt.